

NDP Med Superficies Plus

Desinfectante de superficies críticas

- Basado en la N-Duopropenida
- Alta eficacia según Normativas Europeas
- Para superficies críticas y semi-críticas

Sin aldehídos
tóxicos




Aplicaciones: Suelos, paredes, camillas, mesas de operaciones, pantallas de diagnóstico, goteros, muletas, sillas de ruedas, carros de curas, interior de ambulancias, incubadoras, etc.



NDP Med Superficies Plus

Desinfectante de áreas críticas

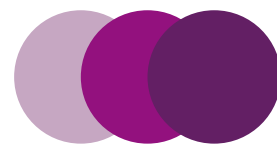

NDP Med Superficies Plus es un desinfectante con acción bactericida, fungicida, micobactericida y viricida, para la desinfección de productos sanitarios no invasivos y de superficies críticas y semi-críticas. NDP Med Superficies Plus es un producto elaborado a partir de NDP (N-Duopropenida). La N-Duopropenida es un compuesto microbicida que provoca la inactivación de enzimas y coenzimas vitales para todos los microorganismos patógenos. El principio activo es una mezcla de dos yodóforos de amonio cuaternario combinados con aminas terciarias, fenoxietanol, tensioactivos catiónicos y no iónicos, con propiedades sinérgicas netamente diferenciadas de los compuestos de amonio cuaternarios tradicionales.


Eficacia

NDP Med Superficies Plus es eficaz contra bacterias (EN 1276 - *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli* - EN 1040 - *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Serratia marcescens*, *Serratia sp.*, - EN 1276 - Multiresistentes - *Acinetobacter baumannii poliR*, *Staphylococcus aureus* SAMR, *E. faecium poliR*, *E. coli* productor BLEE), micobacterias (EN 14348 - *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium terrae* - EN 14563), hongos (EN 1275 - EN 1650 - *Candida albicans*, *Aspergillus niger*) y virus (VIH, VHB, VHC, gripe aviar, rotavirus, coronavirus-SARS, vaccinia, papovavirus). Además, NDP Med Superficies Plus es eficaz en 30 segundos contra *Staphylococcus aureus* (EN 14561) y *Candida albicans* (EN 14562)

Diluciones

Diluir el NDP Med Superficies Plus al 0.25 - 0.5 % (2.5-5 ml de producto NDP Med Superficies Plus por litro de agua). Para potenciar su efecto fungicida y micobactericida se recomienda diluir al 1 - 2 % (10 - 20 ml por litro de agua).

Modo de uso

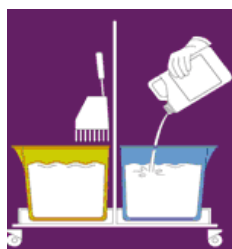

Llenar el cubo de limpieza con la dilución.



La limpieza se hará según la ilustración desde el interior hacia el exterior.



Lo más frecuentemente posible, aclarar la bayeta en el cubo de aclarado antes de sumergirla en el cubo de limpieza.



Después de la limpieza, vaciar los dos cubos.



Aclarar la bayeta bajo el agua corriente y dejar en una solución de desinfectante durante 15 minutos.

Composición

N-Duopropenida
Alquilamina
Fenoxietanol
Excipientes

Presentación

Envases de 250 ml (con dosificador de 10 ml incorporado), 1l o 5l con bomba dosificadora.

Código de producto

MS+250 (envase de 250 ml).
MS+1000 (envase de 1 litro).
MS+5000 (envase de 5 litros).

