

NDP SurfaClin

Desinfectante de superficies y Productos Sanitarios

- Compatible con todo tipo de materiales.
- Solución concentrada.
- Sin aldehídos tóxicos.
- Agradable olor a canela.

Rapidez de acción
frente a bacterias,
virus y hongos



Aplicaciones:

- Productos sanitarios no invasivos.
- Superficies críticas delicadas: metracrilatos, pantallas, incubadoras.
- Semicríticas : camillas, mesas de operaciones, camas de hospitalización, goteros, carros de curas, interior de ambulancias...

CE
0318



NDP SurfaClin

Rapidez de acción frente a bacterias, virus y hongos

NDP SurfaClin es un producto para la desinfección de superficies críticas y semicríticas en hospitales, clínicas y laboratorios y de Productos Sanitarios no invasivos. El producto está elaborado a partir de una mezcla sinérgica de ingredientes activos (NDP), con amonios cuaternarios de última generación combinados con agentes coadyuvantes y extractos activos de aceites esenciales. Tiene un amplio espectro biocida y rapidez de acción frente a bacterias, hongos y virus.

Eficacia

- Bacterias (EN 13697, EN 1276): *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*.

- Hongos (EN 13697, EN 1650): *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.

Los principios activos contenidos en el producto presentan además la siguiente eficacia: *Penicillium glaucum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporum canis*, *Clasdosporium clasdosporoides*, *Penicillium verrucosum*, *Aspergillus versicolor* y virus.

Dilución

Dilución al 2%: verter 20 ml de producto por cada litro de agua, dejando un tiempo de contacto de 5 min.


Modo de uso




Llenar el cubo de limpieza con la dilución.



La limpieza se hará desde el interior hacia el exterior y de arriba hacia abajo.

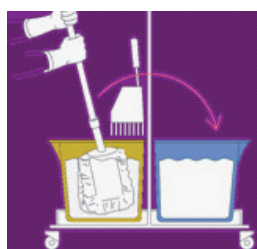

Aclarar la bayeta en el cubo de limpieza, con la mayor frecuencia posible.

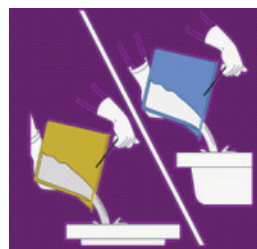

Después de la limpieza, vaciar los dos cubos.



Aclarar la bayeta bajo el agua corriente y dejar en una solución de desinfectante durante 15 minutos.

Composición

Cloruro de didecil dimetil amonio, 2-Fenoxietanol, cinamaldehído, tensioactivos no-iónicos, excipientes y agua.

Presentación

Envases de 250 ml (con dosificador de 10 ml incorporado), 1 L ó 5 L con bomba dosificadora.

Código de producto

- SN250 (envase de 250 ml).
- SN1000 (envase de 1 litro).
- SN5000 (envase de 5 litros).



 **Vesismín**
Soluciones
de desinfección

Vesismín S.L. - Gran Vía Carlos III, 94 - 08028 Barcelona - T. +34 934 095 301 F. +34 933 396 628 - SNEv00

 <http://www.vesismin.com>

 @vesismin

 www.solucionesdesinfeccion.com