


# Toallitas Clinell Esporicidas

Altamente higienizantes y desinfectantes

- Liberan ácido peracético tras su activación con agua.
- Acción esporicida en 1 minuto.
- No generan residuos tóxicos o carcinogénicos.
- Completamente biodegradables.

Eliminan  
*Clostridium difficile*  
y Norovirus

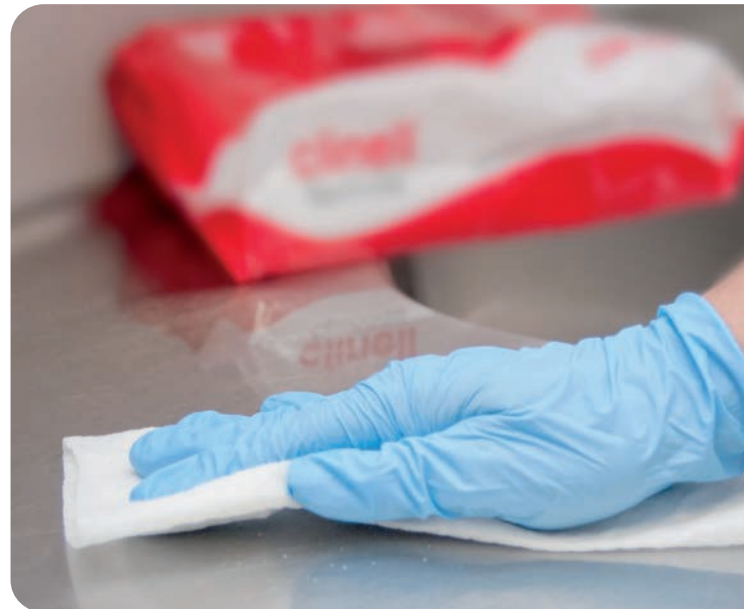


## Aplicaciones:

Equipamiento médico y superficies médicas (incluidos productos sanitarios no invasivos), como superficies de inodoros, sillas de ruedas y colchones.

CE  
0473



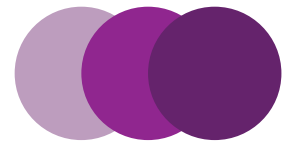

# Toallitas Clinell Esporicidas

## Acción detergente y desinfectante


Las Toallitas Esporicidas Clinell son unas toallitas altamente higienizantes y desinfectantes que se activan con agua. Liberan ácido peracético que elimina todos los microorganismos conocidos, incluido el *Clostridium difficile* y Norovirus. Las toallitas son completamente biodegradables: el activo se degrada en productos no tóxicos. Además, no generan residuos/vapores tóxicos o carcinogénicos ni producen efectos respiratorios al personal sanitario o pacientes.

### Eficacia

- Esporas y Micobacterias (EN 14348): *Bacillus subtilis var niger*, *Mycobacterium terrae*.
- Virus (EN 14476): Adenovirus tipo 5, Poliovirus tipo 1.
- Bacterias (EN 14561, EN1276, EN 13727): *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aerugionsa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*.

El producto también ha sido evaluado según las normas para desinfección de fase 2.2: EN 14562 (eficacia levadurizada), EN 14563 (eficacia tuberculocida), y de fase 2.1: EN 13704 (eficacia esporicida), en condiciones sucias.

### Instrucciones de uso

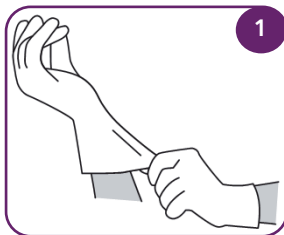

Ponerse guantes.




Sacar una toallita del pack.



Humedecer la toallita con agua para activar la toallita.



Escurrir la toallita en el cubo para retirar el exceso de agua.

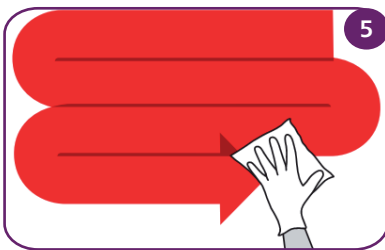

Aplicar la toallita sobre las superficies que han de ser desinfectadas.



Desechar la toallita en como residuo clínico.

### Composición

#### Toallita sin activar

- |  |           |
|--|-----------|
| • Generador de peróxido inorgánico (peroxihidrato de carbonato de sodio) | 25-50%    |
| • Tetra acetilén diamina (TAED)  | 10-25%    |
| • Surfactantes, excipientes y agua                                       | Csp. 100% |

#### Toallita activada

- |                    |      |
|--------------------|------|
| • Ácido peracético | 0.3% |
|--------------------|------|



Vesismín S.L. - Gran Vía Carlos III, 94 - 08028 Barcelona - T. +34 934 095 301 F. +34 933 396 628 - CS25Ev00



<http://www.vesismin.com>



@vesismin



[www.solucionesdesinfeccion.com](http://www.solucionesdesinfeccion.com)