

Tristel Fuse Superficies

Desinfectante esporicida para superficies

- Basado en dióxido de cloro.
- Esporicida en 5 minutos.
- Fácil de usar.
- No es irritante.


Elimina
Clostridium difficile
en 5 minutos



Aplicaciones

Suelos, paredes, todo tipo de superficies duras, camillas, mesas de operaciones, camas de hospitalización, pantallas de diagnóstico, unidades de cultivo celular, FIV, quirófanos, UCIs...



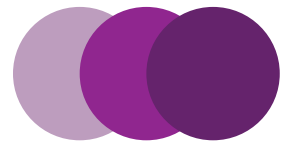

Tristel Fuse Superficies

La respuesta perfecta frente a *Clostridium difficile*

Los sobres individuales Tristel Fuse para superficies constituyen la solución **desinfectante esporicida** para superficies duras. Un sobre activado por cada cinco litros de agua permite generar una solución de **dióxido de cloro** (ClO₂) esporicida, micobactericida, bactericida, levaduricida y viricida.

Eficacia

- Esporas en 5 minutos (EN 13704, AFNOR NF T 72-300): *Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*, *Clostridium difficile*.
- Micobacterias (EN 14348, AFNOR NF T 72-301): *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium terrae*, *Mycobacterium tuberculosis*.
- Virus (AFNOR NF T 72-180, Test en suspensión EN 14476): Enterovirus Polio (Picornaviridae), Adenovirus tipo 5, PoxVirus, Hepatitis C, Human I virus, Poliovirus tipo 2, *Herpes simplex*, Norovirus.
- Hongos (EN 13624, EN13697): *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.
- Bacterias (EN 1276, EN 13727, EN 14561, EN 13697): *Enterococcus hirae*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, P. aeruginosa GRP, MRSA, E. faecium VRE.

Modo de uso



Coger un sobre de producto para producir 5 litros de solución de dióxido de cloro. Apretar uno de los lados del sobre para que el sello que los separa se rompa y los líquidos se mezclen.



Mover el contenido en el sobre durante 60 segundos.



Cortar una esquina del sobre.



Verter el contenido en 5 litros de agua.



Verter la dilución en el cubo de limpieza.

Presentación

Código: FUS/SUR/FRA

Una caja contiene 40 sobres.

Cada sobre genera 5 litros de solución.



 **Vesimin**
Soluciones
de desinfección

Vesimin S.L. - Gran Vía Carlos III, 94 - 08028 Barcelona - T. +34 934 095 301 F. +34 933 396 628 - FUSESUPEV00



<http://www.vesimin.com>



@vesimin



www.solucionesdesinfeccion.com